

La protection absolue des plaies

CHIRURGIE



Ercefilm®

Le Pansement Pelliculaire Transparent



Ercefilm[®] remplace le pansement traditionnel dès la période post opératoire.

Souple et transparent
Imperméable aux germes
Résiste à l'eau eau savon

Ercefilm[®]

- **Isole la plaie des risques de contamination**
- **Permet de vérifier la cicatrisation**
- **Facilite la détection des signes locaux d'infection**
- **Autorise les douches et les bains**
- **Favorise la cicatrisation**

Utiliser Ercefilm[®] :

- **Nettoyer et désinfecter la plaie**
- **Agiter le flacon et vaporiser à environ 10 cm de la plaie en couches minces**
- **Laisser sécher**
- **Ercefilm[®] s'enlève avec une compresse imbibée d'éther, d'alcool ou d'Erceolvant[®]**

Contre-indications :

- **Ne pas vaporiser sur les plaies ou brûlures profondes, étendues ou souillées**
- **Ne pas vaporiser dans yeux ni sur les muqueuses**
- **Hypersensibilité à l'un des constituants**

Composition :

- **Polyméthacrylate d'éthoxyéthyle**
- **Acétate d'éthyle**
- **Ethanol**
- **Propulseur agréé**



Référence : 05100

